

# Vacuum Bell



## バキュームベル

非観血的 陰圧吸引治療

## バキュームベルとは…

吸引源に接続して陰圧を発生させ、漏斗胸などに対して胸骨及び肋骨を持ち上げるために用いる医療機器です。



### ご使用方法

※別売品 吸引ポンプ取付写

1. 吸引器具に接続後、接続に問題がないか確認します。
2. 胸部の凹みにあて吸引圧を調節しながら吸引します。
3. 胸部に強く痛みを伴う場合は吸引圧を緩めてください。
4. 治療を開始してから1週間は朝・夕：15分～30分/2セット（吸引圧をかけて肌の様子と痛みの確認を行って下さい）1週間経過後は朝・夕：60分/2セットとします。
5. 吸引圧を解除する為には、吸引源接続側コックを緩めるか吸引部上部のつまみで引き外すことができます。

製品番号	サイズ	縦径	適応
VB-M	ミニ	16cm	身長104cm～140cm
VB-S	スモール	19cm	身長140cm～170cm
VB-L	ラージ	26cm	身長170cm以上
VB-W	女性用	19cm	乳房が発達した女性
VB-B	ボディビルダー	19cm	特殊な胸郭変形

【包装】1個/箱

医療機器製造届出番号：14B1X90001K00023

※こちらのサイズ表は目安ですので詳しくは弊社担当営業までお問い合わせ下さい。  
製品の仕様等は、予告なく変更になる場合があります。

#### ご使用上の注意

- 本品の使用目的及び使用方法を理解した、医師又はその指示の下でご使用下さい。
- 本品の使用前、使用中、使用後に破損、変形、傷、緩みや動作の異常等がないことを確認して下さい。
- 異常が認められた場合はただちに使用を中止して下さい。
- 破損、変形、傷、緩みの原因となるような過度の力を加えないで下さい。
- 接続部がしっかりと接続されていることを確認してから吸引して下さい。
- 高圧蒸気滅菌は、吸引部及び観察部が変形する恐れがあるため行わないで下さい。
- 健全な皮膚にご使用下さい。
- 皮膚疾患や創傷のある部位には使用しないで下さい。



別売品  
製品名：吸引ポンプ  
製品番号：9990000001  
【包装】1個/袋