

# 取扱説明書 動物用デジタル体温計DIGIFLASH

一般医療機器 動物用

ご使用前に熟読してください。

## 【部品説明】



## 【仕様】

測定範囲: 32.0~43.0° C  
 精度: ±0.1° C 35.0~39.0° C  
 作動条件: 0~50° C 湿度: 10~83%  
 保管条件: -20~60° C 湿度: 10~83%  
 バッテリー(電池): 1.5V直流 アルカリ電池(SR41, LR41)  
 電池寿命: 約100時間/連続使用において、約18ヶ月/1日10分使用において ※付属の電池は試供用です。実際には測定可能時間よりも短い場合がございます。  
 消費電力: 0.15mW  
 タイプ: サーマスタ  
 メモリー: 最新の測定体温が表示されます  
 アラーム: 約4秒間のベル音(ブザー音)により、ピークの温度に達したことを知らせます  
 寸法: 152.0mm x 21.5mm x 14.0mm  
 重量: 約16.8グラム(電池込み)

## 【操作】

- まず、ディスプレイ横のオン/オフボタンを押します。ボタンを離すと、ディスプレイは188.8と表示し、そしてL° C(L° F)が点滅すると1Mが表示され、この状態で体温計は使用できます。近直5回の測定値を呼び戻すには、オン/オフボタンを押し続けるとLCDは188.8と表示し、ボタンを押す毎に1M、2M~5Mと表示されてから温度表示します。
- 周囲の気温が43.0° Cより高い場合は、ディスプレイはH° Cか、32.0° Cより低い表示をします。
- プローブを下向きにして、アルコール綿でプローブ部分を消毒します。
- 直腸使用: K-Yゼリーの様な水溶性のゼリー(潤滑剤)をプローブに塗ってください。挿入を容易にするために、ワセリンの様な石油系の潤滑剤を使用しないでください。温度が安定するまで、プローブを直腸に約1cm挿入します。直腸の温度は、通常では経口測定値より0.5° C高いです。
- 測定時間は通常10~20秒ですが、身体の状態により、より長くかかる場合もあります。
- 最高温度が安定すると、4秒間のベル音(ブザー音)が作動します。
- 体温計は使用後約10分で自動的に電源が落ちます。
- メモリー機能: 体温計は、近直の5回分の測定値を記憶します。

## 注意:

- プローブカバーを使うと実際の温度より0.1° C結果がずれる場合があります。測定にはより長い時間を要します。
- 直腸使用の体温計は、衛生的な理由により、腋窩使用や経口使用のものと分離する様に提唱されています。

## 【洗浄】

フレキシブルチップ及びセンサー部分を洗浄する場合は浸した布か、水で洗浄してください。

溶液(溶剤)	水での希釈	適用方法
イソプロピルアルコール	70%-90%	浸した布での拭き取り
エタノール	70%-80%	浸した布での拭き取り 溶液(溶剤)への浸漬禁止
次亜塩素酸ナトリウム(アンチホルミン)	0.02-0.05%	30分以内の浸漬
グルコネートクロルヘキシジン	0.1%-0.5%	30分以内の浸漬
塩化ベンゼトニウム	0.1%	30分以内の浸漬
塩化ベンザルコニウム	0.1%	30分以内の浸漬
グルタルアルデヒド	0.5%-2%	30分以内の浸漬
アルキポリアミノグリシン	0.05%-2%	30分以内の浸漬

注意: 上記以外の溶液(溶剤)、希釈、適用方法以外の場合、温度計において信頼性に問題が発生する場合があります。

## 【特徴】

- ディスプレイは、測定体温を表示します。
- 最近5回のメモリー(記憶)機能
- ベル音(ブザー音)により、最高温度をお知らせ
- 自動自己点検と自動電源切断
- 素早い体温測定と高精度
- 水銀体温計とデジタル体温計の比較において、デジタル体温計は水銀中毒の問題や割れたガラスによる危険性がありません。

## 【使用上の注意(事前注意)】

- 体温計を噛んだり、曲げたり、落としたり分解したりしないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光、高温、湿気や汚れにさらさないでください(避けてください)。
- ご使用前の前後は柔らかい布と下記の洗浄液で汚れを落とし、プラスチックケースに保管してください。ご家庭の布に水を浸して拭き取ることを推奨します。
- ☑ が表示されたらバッテリーを交換してください

## 【華氏と摂氏の変換】

- オン/オフボタンを押すと、ディスプレイは188.8そして1Mと表示します。
- ディスプレイは、Mが消えた後Lを表示し、ボタンを押して華氏か摂氏の希望の基準を選択します。
- “° F”や“° C”が点滅している時、測定準備が来ています。

## 【バッテリー(電池)交換】

- ディスプレイが ☑ を表示したら、バッテリー(電池)交換が必要です。
- バッテリーカバー(電池カバー)を体温計の本体から反対方向に引き抜きます。
- ペンの様な先の尖ったものを利用して、古いバッテリー(電池)を外します。環境汚染を避ける為に、古いバッテリー(電池)は注意深く取り扱います。
- SR41, LR41, の様な新しい1.5Vの直流バッテリー(電池)もしくは同等のものを、プラスを上、マイナスを下に向けて設置します。
- バッテリーカバー(電池カバー)を装着します。



製品お問合せ先: ソルブ株式会社  
 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-15  
 パレアナビル4F 営業本部  
 TEL: 045-476-3005 FAX: 045-476-3006