

はり又はきゅう用器具
一般医療機器

再使用禁止

チューニングエレメント アニマル

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、4×4cm の粘着性パッチである。プラスチック製保護シートと紙製の裏面で構成されている。身体に刺入せず皮膚に貼付することで身体のコリや疼痛の原因の緩和を行うことができる。



2. 原材料

パッチ	アクリレーツ/Va/ネオデカン酸ビニル共重合体
保護フィルム	プラスチックフィルム
裏紙	剥離紙

【使用目的又は効果】

本品は、家庭で身体のコリや疼痛の原因の緩和を目的に使用するため、身体に刺入せず皮膚に貼付する器具である。

対象動物：犬、猫、ウサギ、ハムスター、モルモットなどの小動物。牛、豚、羊、ヤギ、馬などの家畜。

【使用方法等】

※貼付の際は、貼付部位の被毛を短く整えるか、可能であれば軽く剃毛したうえで使用する。

1. パッチの準備

パッチから透明な保護シートをはがす。

2. パッチを貼る

リリーフパッチを（パッチ側を下にして）乾いた肌に貼りしっかりと押す。

3. パッチを湿らせる

温かい湿ったスポンジ/布をパッチの裏に押し当て完全に湿らせた後30秒待ち、裏紙をはがす。

【使用上の注意】

＜重要な基本的事項＞

・本製品は、薬剤・ハーブ・化学物質を一切使用しておらず、舐めても安心な成分で作られています。ただし、食品ではありませんので、長時間の舐め行為やかじり行為は製品の性能を損なう恐れがあり、誤飲につながる可能性もあります。貼付後は、ペットが舐めたりかじったりしないよう、飼い主様の目の届く範囲でのご使用をお願いいたします。必要に応じて、エリザベスカラー等の使用もご検討ください。

・本製品は、動物の肌に直接触れることで、製品の特性がよりスムーズに発揮されます。貼付の際は、貼付部位の被毛を短く整えるか、可能であれば軽く剃毛したうえでご使用いただくことをおすすめいたします。

※必ず剃る必要はありませんが、貼りつきにくい場合は無理のない範囲で調整をお願いいたします。

・獣医師の治療を受けているもしくは下記に該当する動物は専門家とご相談の上ご使用ください。

- (1) 皮膚に創傷や感染症がある動物。創傷面の悪化や二次感染の可能性あります。
- (2) 妊娠中または授乳中の動物。
- (3) 心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器を装着している動物。
- (4) 他の治療機器を使用中の動物。

・ご使用にあたっては、本品に異常がないか確認してからご使用してください。

・使用中、接触部分が皮膚を傷付ける事があります。その際は、剥がした後の傷跡を化膿防止の為に消毒し、搔かないようにしてください。

・本品の使用により皮膚に発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止し、獣医師又は薬剤師にご相談ください。

・ご使用後、皮膚に貼り付け跡が残る事がありますが、通常は数日で消えます。

・本品を廃棄する場合には、お住まいの各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水ぬれ、直射日光、高温多湿及び化学物質で汚染される可能性のある場所を避けて保管してください。
- ・乳幼児の手の届かない所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】


- ・製造販売業者：ソルブ株式会社
- ・製造業者：Tuning Element
国名：アメリカ合衆国

ペットのコリや疼痛の原因の緩和を目的に使用する、
皮膚に貼付する医療用パッチです。
使用感や感じ方には個体差があります。

【貼り方の手順】 事前に肌を清潔にし、よく乾かしてください。※ 貼った直後は強くこすらないでください。

① 貼りたい部位の
肌をしっかり拭き取
り、清潔にする

② セロハンを剥がす

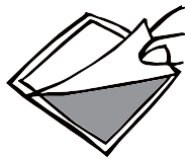

③ 水につける（20 秒）



④ 絵柄の面を肌に密
着させるように貼る



⑤ 台紙をゆっくりと剥がす



⑥ シールを乾かす（1 分）

【長持ちさせるポイント】

・貼る前の肌の準備
パッチを貼る前に、肌をしっかりと清潔にし、乾かしてください。汗や汚れが残っていると粘着力が弱まる場合があります。

【使用上の注意】

パッチがしっかりと皮膚に密着するよう、貼付部位の被毛はあらかじめ短く整えるか、必要に応じて軽く剃毛してください。

被毛が長いままですと、パッチが十分に貼りつかず、効果が得られにくくなる場合があります。

対象動物：犬、猫、ウサギ、ハムスター、モルモットなどの小動物。牛、豚、羊、ヤギ、馬などの家畜

同じ部位への継続使用については、皮膚の状態を確認しながら行ってください。使用中または使用後に皮膚に違和感や異常が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。

- ・直接肌に貼付してご使用ください。
パッチが一部残っている場合でも、自然に剥がれるまで引き続きご使用いただけます。
- ・傷やケガの箇所には貼らないでください。
- ・首輪の下や耳の裏など、ペットが触れにくい場所への貼付をおすすめします。
- ・誤って食べても自然に排出されますが、なるべく舐めないようにご注意ください。
- ・日常的な体調管理の一環として、水分補給を心がけてください。
- ・継続して使用することができますが、皮膚の状態を確認しながらご使用ください。
- ・年齢を問わず使用できますが、体調に不安がある場合は獣医師にご相談ください。

お問い合わせ
ソルブ株式会社 045-773-7787